

## **GEBRUIKSAANWIJZING HERBRUIKBARE MONDMASKERS**

Ze zijn gemaakt volgens een patroon dat FOD volksgezondheid heeft doorgegeven.

De maskers voldoen niet aan de strenge FFP2-norm, maar helpen wel om overdracht van het virus te verhinderen.

De maatregelen van de overheid blijven voor iedereen te allen tijde van kracht.

De mondmaskers hebben volgende specificaties

- Bestaande uit dubbele katoen of poly/katoen met de mogelijkheid (indien gewenst) om deze zelf op te vullen filtermateriaal dat daarvoor geschikt is
- De opening voor de eventuele opvulling zit bovenaan aan de binnenkant.
- Zijn uitgevoerd met sluiting via lintjes of rek (met afsluiting)
- De maskers zijn volledig wasbaar op 60°
- Indien je een extra filter hebt aangebracht moet deze zeker verwijderd worden voor het wassen.

### **Gebruiksaanwijzing**

- Vooraleer het masker te gebruiken moet dit gewassen worden op minimum 60°C . Eenmaal droog, kan je indien gewenst een vervangbare filter in het mondmasker plaatsen.
- Was je handen grondig - ongeveer 20 seconden - met water en zeep alvorens het masker aan te raken.
- Raak de binnenkant van het masker niet aan.
- Gebruik de uiteinden van de linten of rek om het masker aan te brengen en eventueel te verschuiven op je gezicht. Hou je handen zo ver mogelijk van je gezicht.
- Het is essentieel het zelfgemaakt masker elke dag te wassen op minimum 60°C. Wel altijd eerst de filter verwijderen (indien je deze hebt aangebracht)
- Indien je merkt dat de stof van het mondmasker ten gevolge van de vele wasbeurten beschadigd is moet men deze weggooien. Dit moet behandeld worden als restafval en gedeponeerd worden in een plastic zak.

Merlet NV

Neringstraat 6

2360 Oud-Turnhout

014 45 32 00

info@merlet.be